

Kit de prélèvement d'échantillon sur écouvillon multitest Aptima[®]

Procédure de prélèvement par le clinicien


Prélèvement d'échantillons sur écouvillon rectal



Ouvrez partiellement l'emballage de l'écouvillon et sortez-le. Ne touchez pas l'embout cotonneux et ne posez pas l'écouvillon. **Si vous posez ou laissez tomber l'écouvillon ou que vous touchez l'embout cotonneux, jetez-le et procurez-vous un nouveau kit de prélèvement d'échantillon sur écouvillon multitest Aptima.** Saisissez l'écouvillon en le tenant entre le pouce et l'index au milieu de la tige, au-dessus de la ligne noire. Ne tenez pas l'écouvillon en-dessous de cette ligne.

Procédure de prélèvement d'échantillon pour :

- *Chlamydia trachomatis* (CT)
- *Neisseria gonorrhoeae* (NG)

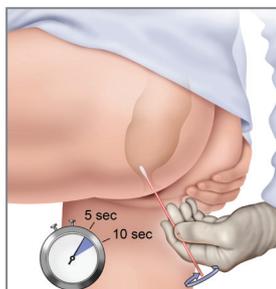


Insérez délicatement l'écouvillon dans le rectum à environ 3 à 5 cm de profondeur au-delà de la marge anale (l'extérieur de l'anus) et faites doucement tourner l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.



Cassez l'écouvillon au niveau de la ligne



Dévissez le bouchon du tube tout en tenant l'écouvillon entre vos doigts. Ne renversez pas le contenu du tube. **Si vous renversez le contenu du tube, jetez-le et remplacez-le par un nouveau kit de prélèvement d'échantillon sur écouvillon multitest Aptima.** Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube de transport de façon à ce que la ligne noire se trouve au niveau du haut du tube. Alignez la ligne noire avec le haut du tube et cassez la tige avec précaution. L'écouvillon doit tomber au fond du tube. Jetez l'autre partie de la tige.

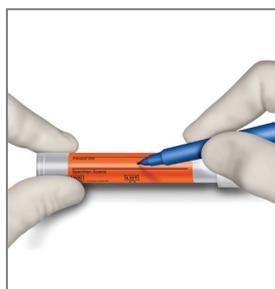

Revissez fermement le bouchon du tube. En cas de prélèvement de plusieurs échantillons sur le même patient, l'étiquette du tube fournit une zone permettant l'identification unique de la provenance de l'échantillon.



Cette procédure de prélèvement est fournie par Hologic à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une instruction péremptoire ni une garantie. Il appartient au médecin, et à lui seul, de lire et de comprendre la notice correspondante et de respecter les normes et réglementations locales, fédérales et nationales applicables.

Diagnostic Solutions | Hologic.fr | france@hologic.com

Le Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (kit de prélèvement de spécimen sur écouvillon Aptima Multitest) est conçu pour être utilisé avec les tests Aptima. Le Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit est destiné à être utilisé par les cliniciens et les patients pour le prélèvement de spécimens sur écouvillon vaginal, sur écouvillon rectal, et sur écouvillon de la gorge, et pour le prélèvement par le patient de spécimens sur écouvillon du méat du pénis. Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d'utilisation de (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d'utilisation des réactifs. DS-09497-FRA-FR Rév 001. © 2017 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, The Science of Sure, Aptima et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ni faire la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusion en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic ou écrivez à france@hologic.com.